



**MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES**  
**Homologación UNE 0065**

**REUSABLE HYGENIC FACE MASK**  
**Homologation UNE 0065**

**MASQUES BARRIERES RÉUTILISABLES**  
**Homologation UNE 0065**

**ESP**

Eficacia probada de filtración de partículas sólidas y líquidas. Cómoda y transpirable. Permite hasta **50 ciclos** de lavado a 60° sin perder sus propiedades.

**ENG**

Proven solid and liquid particle filtration efficiency. Comfortable and breathable. It allows up to **50 washing cycles** at 60° without losing its properties.

**FR**

Efficacité prouvée de la filtration des particules solides et liquides. Confortable et respirant. Possible de **laver 50 cycles** à 60 ° sans perdre ses propriétés.



**RESULTADOS | RESULTS | RESULTATS**

TEST	W&W MASK	UNE 0065
Filtración de partículas sólidas y líquidas Solid and liquid particle filtration <b>L'efficacité de filtration des particules</b>	<b>95%</b>	<b>≥90%</b>
Respirabilidad Breathability <b>Résistance respiratoire</b>	<b>&lt; 44 Pa/cm<sup>2</sup></b> <b>&lt; 0,44 mbar/cm<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 60 Pa/cm<sup>2</sup></b> <b>&lt; 0,60 mbar/cm<sup>2</sup></b>



**ADVERTENCIAS | WARNINGS | AVERTISSEMENTS**

- Este producto **NO** es un Equipo de Protección Individual (EPI)  
This product is not a Personal Protective Equipment (PPE)  
**Ce dispositif n'est un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.**
- Este producto **NO** es para uso sanitario  
This product is not for a medical use  
**Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.**



## CARÁCTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTERISTIQUES



**Capa exterior:** 100% microfibra poliéster repelente a fluidos | **Capa interior:** 35% algodón 65% poliéster  
External layer: 100% fluid repellent polyester microfiber. Internal layer: 35% cotton 65% polyester.

**Tissus extérieur:** 100% microfibre déperlant |  
**Tissus intérieur:** 35% Coton / 65% Polyester



**Símbolos de lavado y conservación**  
Símbolos de lavado y conservación  
**Symboles de lavage et de préservation**



**Transpirable** por su poliéster respetuoso con la piel  
Breathable due to its skin-friendly polyester  
**Respirable** par son polyester



**Suave** por la composición de su capa interior  
Softness guaranteed by its internal rich cotton layer  
**Doux au visage** par le tissu intérieur



50 ciclos de lavado a 60° sin perder sus propiedades  
Up to 50 washing cycles at 60° without losing its properties.  
**Possible de laver 50 cycles à 60 ° sans perdre ses propriétés.**



**Apta** para espacios interiores y exteriores  
Suitable for indoor and outdoor  
**Adaptés pour intérieur et extérieur**



## RECOMENDACIONES DE USO

Lavarse las manos con jabón o desinfectante antes de colocarse la máscara protectora  
Washing your hands with sanitizer before putting on your face mask  
**Lavez les mains avec du savon ou du désinfectant avant de mettre le masque barrière**

Ponerse la máscara minuciosamente colocando las gomas tras las orejas y dejando cubierta boca y nariz.  
Wearing carefully your mask placing rubber bands behind your ears and covering your mouth and nose.  
**Mettez le masque avec précaution en plaçant les élastiques derrière vos oreilles et en laissant votre bouche et votre nez couverts.**

No tocar la máscara protectora mientras se lleve puesta. Si toca la mascarilla, lavarse las manos con jabón o desinfectante  
Do not touch your face mask while wearing it. Whenever you get in contact with its surface, wash your hands with sanitizer  
**Ne touchez pas le masque quand vous le portez. Si vous touchez le masque, lavez vos mains au savon ou désinfectant.**

Dejar de usar la máscara protectora cuando esté húmeda y quitarse la mascarilla sin tocar la parte frontal. Después de tocar la mascarilla usada, lavarse las manos con desinfectante.  
Stop using the protective mask when it is wet and remove the mask without touching the front. After touching the used mask, wash your hands with sanitizer.  
**Cessez d'utiliser le masque de protection lorsqu'il est mouillé et retirez le masque sans toucher l'avant. Après avoir touché le masque utilisé, lavez-vous les mains avec désinfectant.**